


LOPARČEK ZA GINEKOLOŠKI BRIS

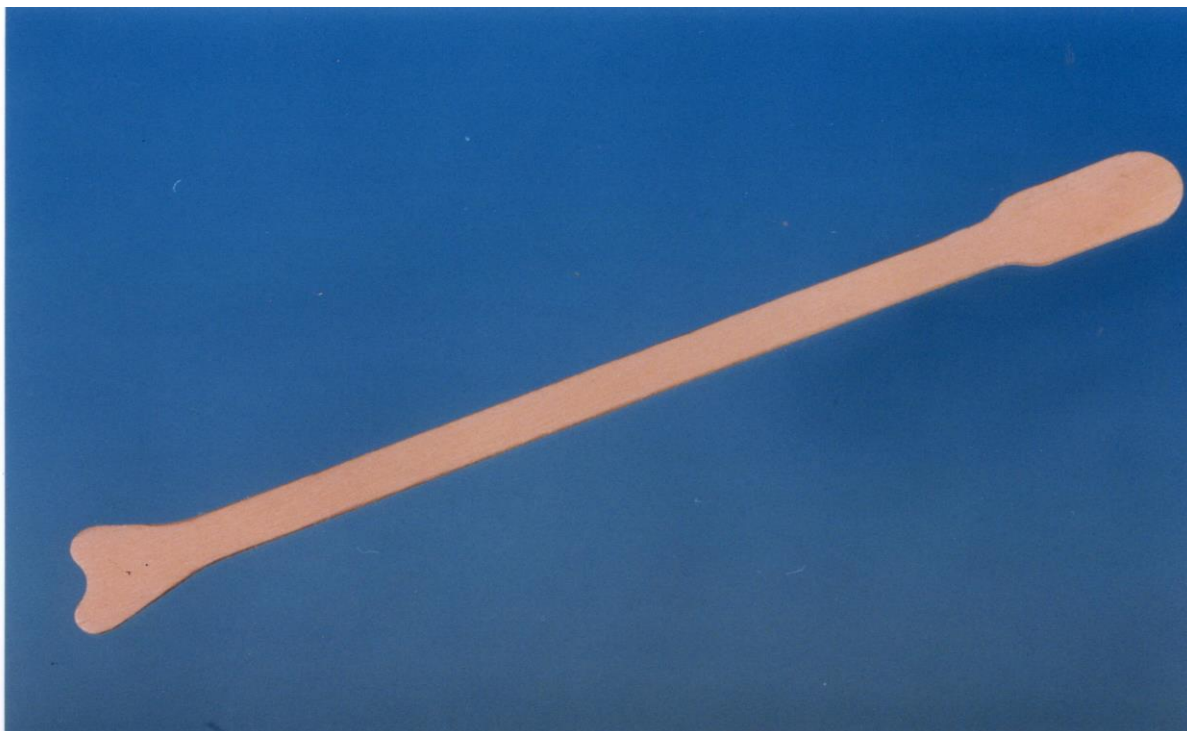

(koda izdelka: 3030)

Namen uporabe: Loparček za ginekološki bris - po Ayru (**koda 3030**) je narejen iz kakovostnega lesa in služi za odvzem brisa z ustja maternice.

Način uporabe: Razprete vaginalni kanal s spekulomom, tako da je cerviks viden. Počasi potisnete srčasti del loparčka do materničnega ustja tako, da je daljši del na vhodu v cervikalni kanal in zavrtite loparček okoli svoje osi oz. postrgate po površini ustja maternice. Pri tem je pomembno, da loparček pobere čimveč celic z materničnega ustja, pa tudi s spodnjega dela endocervikalnega kanala, kjer najpogosteje nastajajo patološke spremembe. Odvzete celice razmažete na stekelce ter napravite fiksacijo. V laboratoriju nato citolog(-inja) bris analizira in ugotovi morebitna obolenja oz. spremembe celic.

Za celovito citološko preiskavo, je potrebno odvzeti bris s ščetko in z loparčkom. Pri brisu materničnega vratu se lahko pojavi manjša krvavitev, zato se endocervikalni bris (s ščetko) vedno opravi po odvzemu brisa materničnega ustja.

Odvzem brisa opravi strokovno usposobljena oseba (ginekolog-inja).

Izdelek je nesterilen in namenjen za enkratno uporabo. Pred uporabo ga je potrebno sterilizirati, npr. s parno sterilizacijo.



Proizvajalec: Metaloplast d.o.o. Kobarid
proizvodnja medicinskih pripomočkov
Staro selo 47a, 5222 Kobarid, Slovenija
tel: 05 38 48 043
www.metaloplast.si info@metaloplast.si